

## 水銀レス自動血圧計

KM-385

KM-3850D

## ■ 製品仕様 (水銀レス自動血圧計 KM-385・KM-3850D 共通)

測定方法	リバロッチ・コロトコフ法 / オシロメトリック法	
表示	バー LCD / ドット LCD	
圧力表示範囲	3 ~ 300mmHg	
測定範囲	血 壓 (自動測定時)	50~250mmHg(最高血圧) 40~180mmHg(最低血圧)
	脈 拍 数	30 ~ 199 拍 / 分
腕帶内圧力表示の誤差	±3mmHg 以内	
脈拍測定精度	±5% 以内	
臨床性能試験による 血圧測定の誤差	聴診に対する平均誤差	±5mmHg 以内
	標準偏差	8mmHg 以内
急速排気	260mmHg から 15mmHg への急速排気時間は 10 秒以下	
加 壓	自動 (エアポンプ)	
減 壓	電子制御弁	
排 気	自動急速排気弁	
電 源	AC アダプタ (UM312-7516) 又はバッテリパック (GP170AAH)	
機器分類 / クラス分類	特定保守管理医療機器 / クラス II	
外来固形物及び水の有害な侵入に対する保護の 程度による分類	IP20( 指の侵入に対する保護。水の侵入に対する保護は無し。)	

## ■ 製品仕様 (水銀レス自動血圧計 KM-385)

本 体 重 量	約 1.3Kg(バッテリパック含む)
本 体 尺 法	約 137(W) × 約 228(D) × 276(H) 単位:mm
標準付属品	綿カフ 385 ブラダーセット M × 1 綿カフ 385 ブラダーセット L × 1 エアチューブ × 1 バッテリパック × 1 AC アダプタ × 1 取扱説明書(保証書付) × 1 添付文書 × 1
	医療機器認証番号: 302AFBZX00008A01

## ■ 製品仕様 (水銀レス自動血圧計 KM-3850D)

本 体 重 量	約 3.05Kg(バッテリパックとキャリースタンドを含む)
本 体 尺 法	約 136(W) × 約 230(D) × 414(H) 単位:mm
主な付属品	綿カフ 385 ブラダーセット S × 1 綿カフ 385 ブラダーセット M × 1 エアチューブ × 1 バッテリパック × 1 AC アダプタ × 1 アタッチメント × 1 腕帶ボックス × 1 プリンター台 × 1 キャリースタンド組立用部品 取扱説明書(保証書付) × 1 添付文書 × 1
	医療機器認証番号: 302AFBZX00008000

&lt;発売元&gt;

ケンツメディコ株式会社

本社 〒367-0206 埼玉県本庄市児玉町共栄552-1  
TEL(0495)71-1001 FAX(0495)72-6716  
ホームページ <http://www.kenzmedico.co.jp>

&lt;製造販売業者&gt;

日本精密測器株式会社  
〒377-0293群馬県渋川市中郷2508-13

## 多彩な機能をコンパクトに集約

らくらく  
血圧測定  
バー表示  
&  
デジタル表示

選べる  
測定モード  
測定方式



KM-385(卓上型)

※OD検査モードはありません



KENZMEDICO

# 水銀柱イメージデジタル血圧計

水銀レス自動血圧計 KM-385

## 多彩な機能をコンパクトに集約

### — KM-385・KM-385OD 共通機能 —



水銀レス自動血圧計  
KM-385(卓上型)

らくらく  
血圧測定

バー表示  
& デジタル表示

選べる  
測定モード  
測定方式

らくらく血圧測定  
腕帯加圧値を専用つまみで簡単設定  
・圧力は80~280mmHgに設定できます。  
電源 ON して、スタートボタンを押すだけ



バー表示&デジタル表示  
水銀柱をイメージした見やすいバー表示  
・上下に動く超高輝度液晶バーを採用し、美しく  
見やすく、使いやすくなっています。  
・測定後は、測定値がアナログバー表示されます。  
測定結果はデジタル数字表示で簡単読み取り



#### 選べる測定モード、測定方式

##### 自動測定

単回測定モード 自動測定を1回行います。

平均測定モード 自動測定を複数回(2回又は3回)行い、平均値を算出します。

##### 選べる測定方式

###### ノーマル方式

・リバロッチ・コロトコフ法をベースにしてオシロメトリック法との併用で測定します。

###### クイック方式

・オシロメトリック法で測定します。

###### 聴診測定

・自動測定は行わず、圧力表示のみを行います。聴診器を用いた  
聴診法による測定にご使用いただけます。

###### 〈ホールド機能〉

最高血圧と判定したポイントでSTART/HOLDボタンを押すと  
最高血圧値が、次に最低血圧と判定したポイントで  
START/HOLDボタンを押すと最低血圧値が保持されます。



##### 前回値メモリ機能

・それぞれのモードの前回の測定結果を表示します。

##### 測定結果はプリントアウト

※プリントアウトには、別売りプリンターが必要です。

##### HIDE モード

・自動測定(単回・平均)の加圧値、バーLCDを非表示にすることができます。  
測定が終了すると、測定結果が表示されます。

付属腕帯M・L



※KM-385(卓上型)をスタンド型としてご使用  
いただくこともできます。

その際には、別売り品「KM-385 キャリースタンド」にセットしてご使用ください。

##### 腕帯の特徴

###### JIS 規格対応

・JIS規格対応のコネクタを採用しました。



###### 綿力フヒノンラテプラダー

・肌あたりの柔らかい綿力フヒノンラテックスプラダーを使用  
しています。



サイズ 適応 腕周  
S 17~25(cm)  
M 22~32(cm)  
L 32~42(cm)

# OD 検査モード付き水銀レス自動血圧計

水銀レス自動血圧計 KM-385OD

## KM-385ODはこれまでのOD検査の負担を軽減!

日本小児心身医学会ガイドラインの「新起立試験法」に対応したモードを搭載しています。

水銀レス自動血圧計  
KM-385OD(スタンド型)

プラス  
+ 機能

OD検査モード付き

らくらく  
血圧測定

バー表示  
& デジタル表示

選べる  
測定モード  
測定方式

ボタンを押す

ボタンを押す

ボタンを押す

付属腕帯S・M


付属腕帯S・M

プラス  
+ 機能  
OD検査モード

KM-385  
OD



ボタンを2回押すだけ

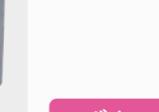

被検者  
安静臥位



動画でチェック

KM-385ODを  
使用した新起立  
試験法を紹介して  
おります。

